

Guide rapide d'utilisation



Ce guide ne remplace pas
le manuel utilisateur

Destiné à toute
personne habilitée
aux réglages

Français

Allumer l'appareil



Appuyer sur



Éteindre l'appareil



Appui long sur



+ VALIDER.

Gérer la ventilation



Pour démarrer la séance : appui court sur



Pour arrêter la séance : appui long sur




+ VALIDER.

Déverrouiller le menu clinique



Appuyer sur le bouton **Menu (1)**, puis **déverrouiller le menu Clinique** en appuyant et maintenant **(2)** et **VALIDER (3)**.

Nouveau Patient / Circuit

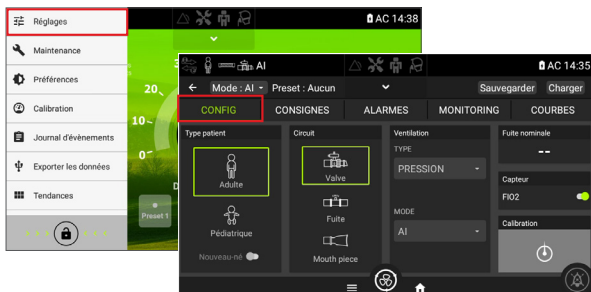

Sélectionner **CLINIQUE**, puis **CONFIG** et définir la configuration du Type de circuit patient et du Mode de ventilation.

Calibration / Autotest



Suivre les étapes affichées à l'écran pour effectuer une calibration, puis appuyer sur **Résultat**.


La calibration doit être effectuée après chaque changement de configuration du circuit.

Réglage de la ventilation



Dans l'onglet **CONSIGNES** : choisir les **consignes de ventilation**. Sélectionner le paramètre à régler, ajuster par + ou -, puis appuyer sur **VALIDER** pour valider le réglage.

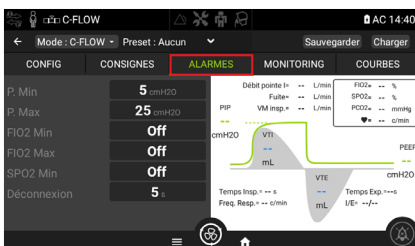

Configuration des alarmes



À partir de l'onglet **ALARMES**, régler les alarmes, puis appuyer sur **VALIDER**.

Inhiber les alarmes



Inhibition de l'alarme active : appuyer sur 
Inhibition préventive (2 min) : appuyer et maintenir  + **VALIDER**.

Choix du circuit patient

Remarque : L'EO-150 permet d'utiliser tous les circuits qui ont été étalonnés avec succès.

 **Circuit simple branche à fuites**
ou embout buccal




 **Circuit simple branche à valve**
expiratoire (sans capteur de débit proximal)



 **Circuit simple branche à valve expiratoire**
(avec capteur de débit proximal)



 **Circuit double branche**
(avec adaptateur)



L'adaptateur double branche est patient unique. En cas d'utilisation sur plusieurs patients, utiliser un filtre antibactérien sur la branche expiratoire afin de protéger l'adaptateur.


Désactiver le verrouillage automatique du menu Clinique

Le verrouillage automatique du menu clinique (activation du mode patient après 15 minutes d'inactivité) peut être désactivé à partir du menu **Maintenance** de l'appareil, avec le code d'accès « **1586** ».



Affichage hospitalier

Pour afficher les réglages et les alarmes sous forme de liste (réglages + monitorings sur la même page), accéder au menu **Préférences** et activer « Réglages sous forme de liste ».

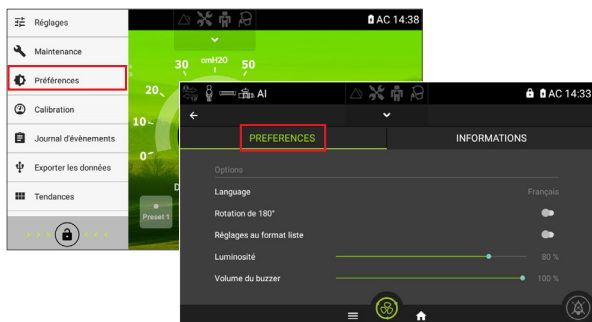

Fabriqué par

EOVE
Helioparc
4, Boulevard Lucien Favre
64000 Pau
France
www.eove.fr



L'EO-150 fournit une assistance ventilatoire continue ou intermittente aux adultes et aux enfants pesant au moins 3,5 kg qui ont besoin d'une ventilation mécanique, à domicile, dans un établissement ou un hôpital, et dans des environnements portables, pour une ventilation invasive ou non invasive.

Appareil médical de classe IIb - CE 0459 - Fabriqué par EOVE. Veuillez lire le manuel de l'utilisateur.