

EOVE+




EO-70

Dispositif de Management des Sécrétions

Coaching function

L'écran Coaching en INEX

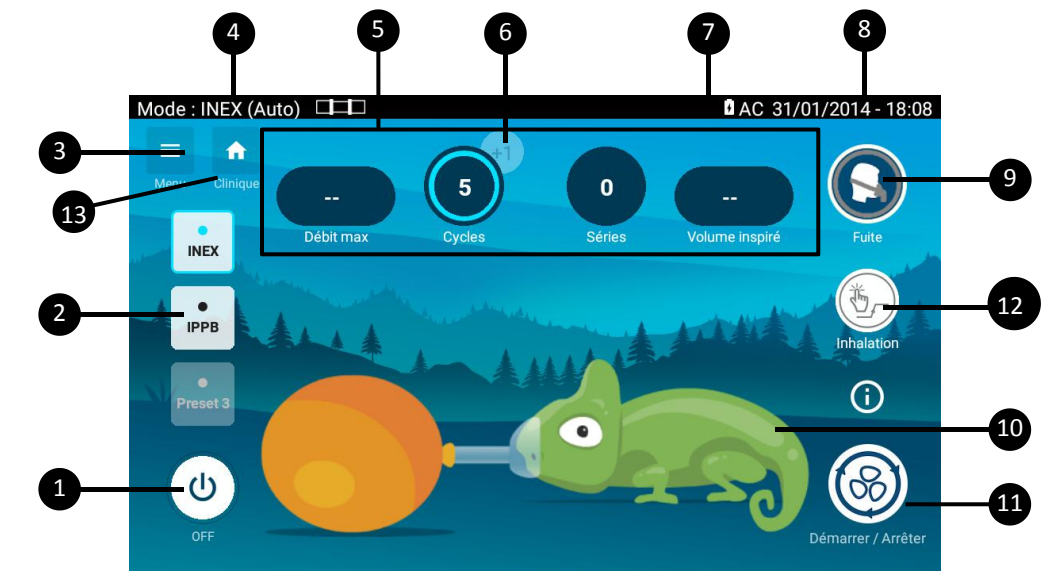


- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bouton d'extinction 2. Préréglages (1-3) : Préréglages accessibles au patient. 3. Bouton menu : Donne accès aux différents menus 4. Indicateur de mode de thérapie: INEX (manuel/Auto) ou IPPB 5. Monitorages de thérapie: affiche les valeurs monitorées en temps réel pendant la thérapie. 6. Bouton d'ajout de cycle: permet d'ajouter un cycle à la thérapie en cours si nécessaire. 7. Témoin d'autonomie batterie: indique le niveau de charge restant dans la batterie ou si la batterie est en charge. | <ol style="list-style-type: none"> 8. Date et heure: indique la date au format AAAA/MM/JJ et l'heure au format 24h. Ils peuvent être changés depuis le menu préférences. 9. Indicateur de fuite. 10. Caméléon: Animation qui suit la thérapie paramétrée pour aider le patient. 11. Bouton arrêt / démarrage: démarre ou arrête la thérapie. 12. Bouton Trigger: permet de déclencher manuellement une inspiration pendant une thérapie. 13. Raccourci pour l'écran clinique |
|---|--|


Utilisation de la fonction Coaching pour réaliser une thérapie en mode INEX

Configurer en INEX Auto et démarrer la thérapie. Le caméléon et le ballon vont suivre les différentes phases de la thérapie :

- Pendant l'inspiration, le caméléon gonfle et le ballon dégonfle.

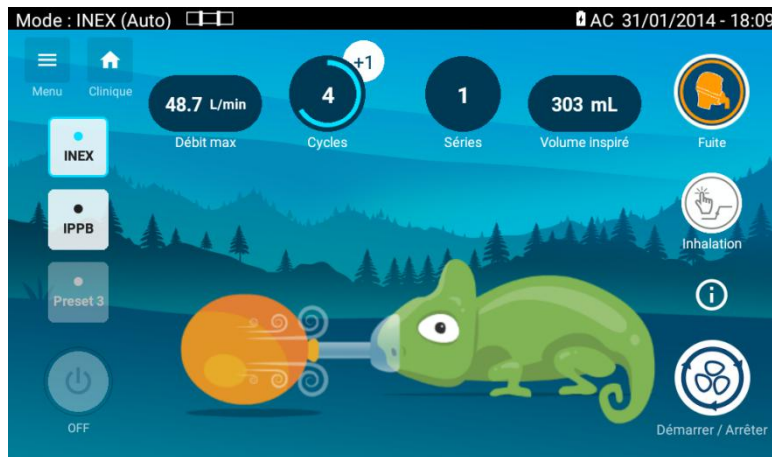

- Pendant l'expiration, le caméléon dégonfle et le ballon gonfle.

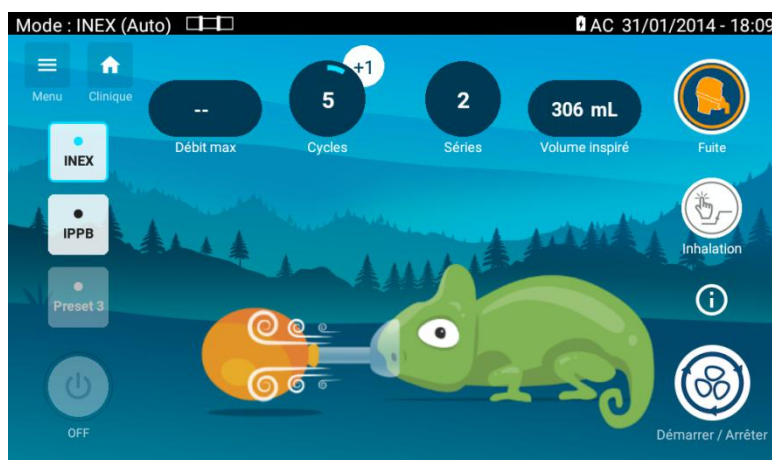

- Pendant la pause, le caméléon et le ballon ne bougent pas.

Les monitorages:


- Le débit de pointe est mis à jour après chaque expiration.
- Le décompte de cycle diminue après chaque expiration. Il peut être incrémenté avec le bouton «+1» pendant le dernier cycle.
- Le compteur de série est incrémenté après chaque démarrage de thérapie. Il est remis à zéro au changement de préréglage et à l'arrêt de l'appareil.
- Le volume est mis à jour après chaque inspiration.
- Indicateur de fuite: il se colorera en orange à la fin de l'inspiration si il y a trop de fuites au niveau de l'interface patient et que celle ci doit être mieux ajustée. Cela peut également dire que le temps inspiratoire est trop court pour que la pression pulmonaire atteigne la pression inspiratoire réglée.

A la fin du thérapie (ou à l'arrêt de la thérapie par le bouton «Passer»), une fenêtre va apparaître pour demander au patient si une nouvelle série va être réalisée ou non.



Le chronomètre est indicatif. Cliquer sur «Passer la pause» pour redémarrer une série ou sur «Fin de traitement» pour arrêter la thérapie.

L'écran Coaching en IPPB

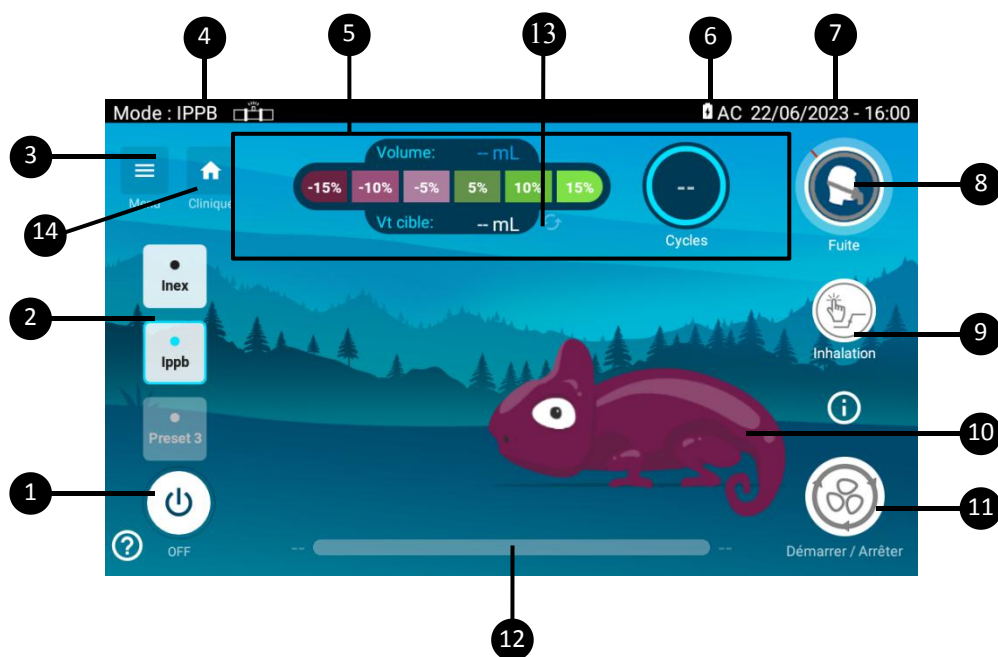


<ol style="list-style-type: none"> 1. Bouton d'extinction 2. Préréglages (1-3) : Préréglages accessibles au patient. 3. Bouton menu : Donne accès aux différents menus 4. Indicateur de mode de thérapie: INEX (manuel/Auto) ou IPPB 5. Monitorages de thérapie: affiche les valeurs monitorées en temps réel pendant la thérapie. 6. Témoin d'autonomie batterie: indique le niveau de charge restant dans la batterie ou si la batterie est en charge. 7. Date et heure: indique la date au format AAAA/MM/JJ et l'heure au format 24h. Ils peuvent être changés depuis le menu préférences. 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Indicateur de fuite 9. Bouton Trigger: permet de déclencher manuellement une inspiration pendant une thérapie. 10. Caméléon: Animation qui suivra la thérapie paramétré pour aider le patient 11. Bouton arrêt démarrage: démarre ou arrête la thérapie. 12. Barre de temps de thérapie: affiche le temps de thérapie passé et le temps de thérapie restant 13. Réinitialisation du volume cible précédemment défini 14. Raccourci pour l'écran clinique
---	---

Utilisation de la fonction coaching pour réaliser une thérapie IPPB

Configurer en mode IPPB et démarrer la thérapie. Suivant le paramétrage, l'inspiration peut soit être déclenchée par le patient, soit en utilisant le bouton dédié.

Le monitoring du Volume montre l'évolution en direct du volume durant l'inspiration. Ce monitoring reste à la valeur du volume final jusqu'à la prochaine inspiration. Le compteur de cycle est incrémenté au début de chaque inspiration.

A la fin de chaque inspiration, les fuites de l'interface sont évaluées et l'indicateur de fuite  devient orange si il y a trop de fuite à l'interface patient et qu'elle doit être mieux ajustée.

Pendant l'inspiration, le caméléon gonflera en suivant la proportion du volume initial atteinte. Il changera progressivement de couleur vers le vert, quand le volume atteindra et dépassera le volume initial.

Lorsque le paramètre de volume initial est désactivé, pour les 3 premières inspirations:

- Le caméléon ne bouge pas
- Le monitoring Volume initial reste indéfini

A partir de la première inspiration si le paramètre de volume initial est activé ou après 3 inspirations si le paramètre est désactivé:

- le Volume initial est défini. C'est le volume moyen des 3 premières inspirations. Il reste inchangé jusqu'à la fin de la thérapie.

Pendant l'expiration, le caméléon dégonflera progressivement jusqu'à revenir à la taille et à la couleur de départ. Il restera ainsi jusqu'à la prochaine inspiration. La flèche du graphique de volume bougera suivant la proportion du volume initial atteinte. Elle restera au niveau maximum atteint jusqu'à la prochaine inspiration.

