




AC-70

Dispositivo di gestione delle secrezioni

Guida per l'utente Funzione Coaching

Schermata Coaching in INEX

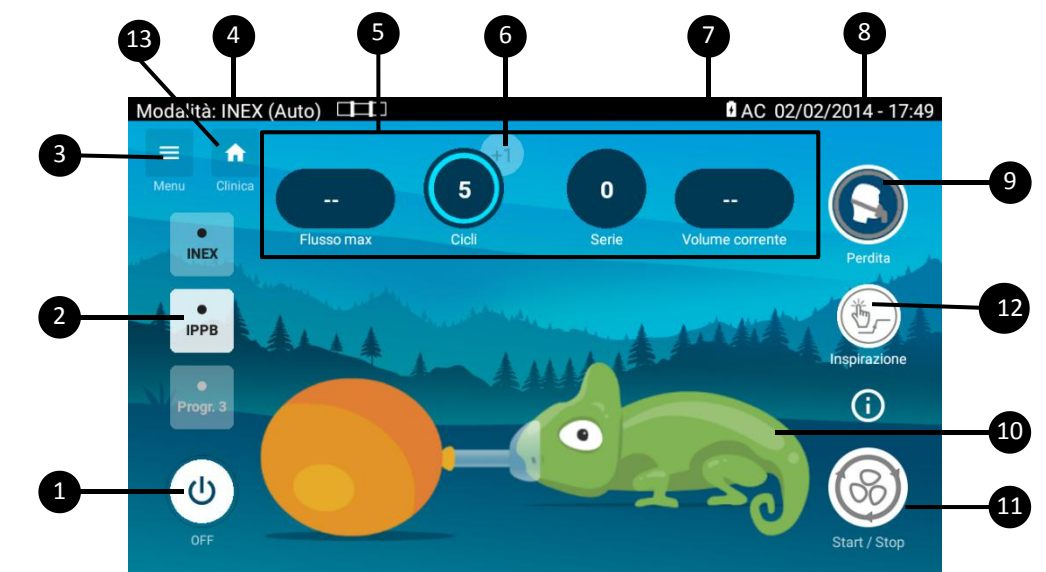


- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulsante di spegnimento. 2. Impostazioni predefinite (1-3): impostazioni predefinite accessibili al paziente. 3. Pulsante menu: fornisce l'accesso a diversi menu. 4. Indicatore di modalità terapeutica: INEX (manuale/auto) o IPPB. 5. Monitoraggio della terapia: visualizza i valori monitorati in tempo reale durante la terapia. 6. Pulsante di aggiunta di ciclo: permette di aggiungere un ciclo alla terapia in corso, se necessario. | <ol style="list-style-type: none"> 7. Spia di autonomia batteria: indica il livello di carica residua della batteria o se la batteria è in carica. 8. Data e ora: indica la data in formato AAAA/MM/GG e l'ora in formato 24 ore. Possono essere modificate nel menu Preferenze. 9. Indicatore perdite 10. Camaleonte: animazione che segue la terapia impostata per aiutare il paziente. 11. Pulsante arresto/avvio: avvia o arresta la terapia. 12. Pulsante "Trigger": permette di interrompere manualmente un'inspirazione durante una terapia. 13. Scorciatoia per lo schermo clinico |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Utilizzo della funzione coaching per eseguire una terapia in modalità INEX

Configura una terapia INEX Auto e avviare la terapia. Il camaleonte e il palloncino seguiranno le diverse fasi della terapia:

- Durante l'inspirazione, il camaleonte si gonfia e il palloncino si gonfia.

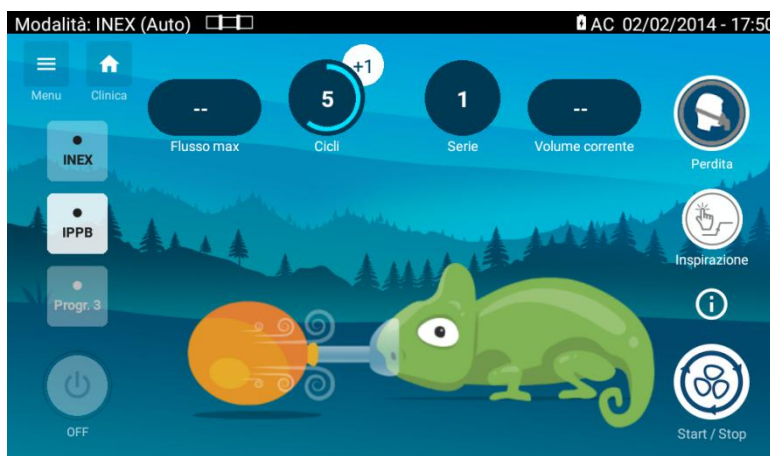

- Durante l'espiazione, il camaleonte si sgonfia e il palloncino si sgonfia.

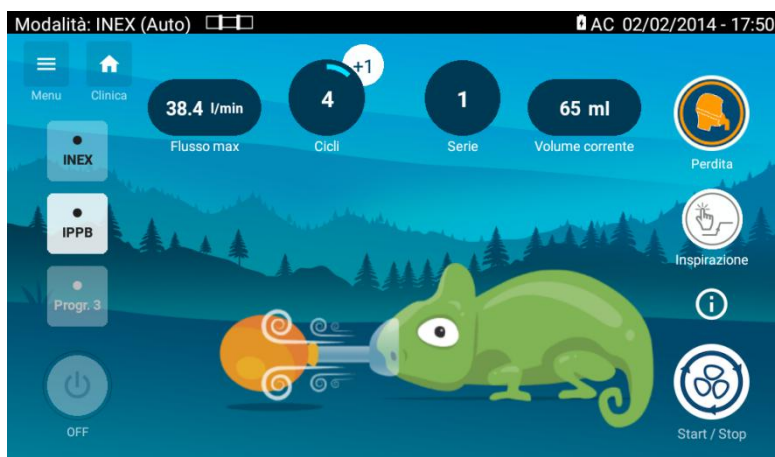


- Durante la pausa, il camaleonte e il palloncino non si muovono.

I dati monitorati sono:


- Il picco di flusso espiratorio, aggiornato dopo ogni espirazione.
- Il contatore di cicli, che diminuisce dopo ogni espirazione. Può essere aumentato con il pulsante "+1" durante l'ultimo ciclo.
- Il contatore di serie aumenta dopo ogni avvio di terapia. Viene azzerato alla modifica dell'impostazione predefinita e all'arresto dell'apparecchio.
- Il volume viene aggiornato dopo ogni inspirazione.
- Indicatore perdite: diventerà arancione alla fine dell'inspirazione se ci sono troppe perdite nell'interfaccia del paziente e deve essere regolato meglio. Potrebbe anche significare che la pressione inspiratoria è troppo breve per raggiungere la pressione inspiratoria impostata. Potrebbe anche significare che il tempo inspiratorio è troppo breve perché la pressione polmonare raggiunga la pressione inspiratoria impostata.

Al termine della terapia (o all'arresto della terapia mediante il pulsante "Passa"), viene visualizzata una finestra che chiede al paziente se sarà eseguita una nuova serie o no.

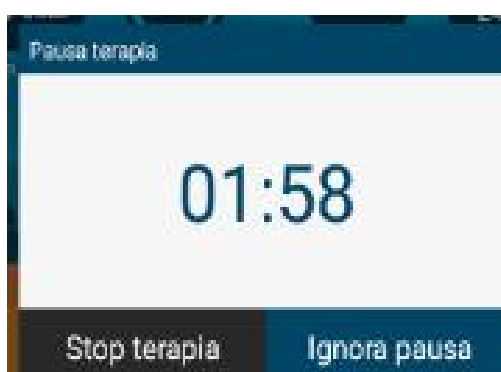

Il cronometro è indicativo. Fare clic su "Passa la pausa" per avviare una nuova serie o su "Fine terapia" per interrompere la terapia.

Schermata Coaching in IPPB

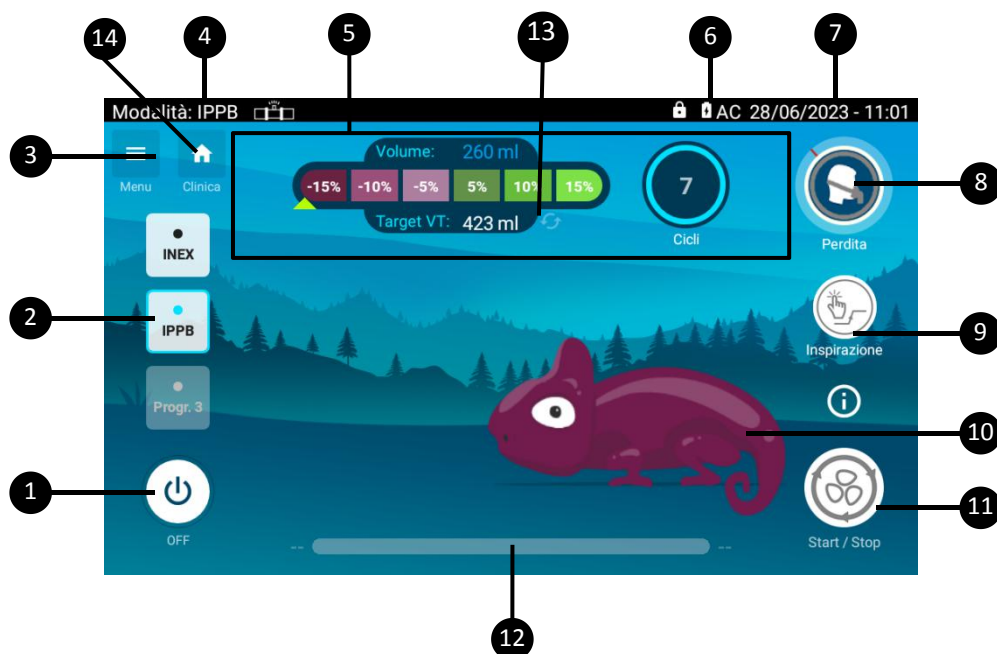

1. Pulsante di spegnimento.	7. Data e ora: indica la data in formato AAAA/MM/GG e l'ora in formato 24 ore. Possono essere modificate nel menu Preferenze.
2. Impostazioni predefinite (1-3): impostazioni predefinite accessibili al paziente.	8. Indicatore di perdita
3. Pulsante menu: fornisce l'accesso a diversi menu	9. Pulsante "Trigger": permette di interrompere manualmente un'inspirazione durante una terapia.
4. Indicatore di modalità terapeutica: INEX (manuale/auto) o IPPB	10. Camaleonte: animazione che segue la terapia impostata per aiutare il paziente.
5. Monitoraggio della terapia: visualizza i valori monitorati in tempo reale durante la terapia.	11. Pulsante arresto/avvio: avvia o arresta la terapia.
6. Spia di autonomia batteria: indica il livello di carica residua nella batteria o se la batteria è in carica.	12. Barra di tempo della terapia: visualizza il tempo di terapia trascorso e il tempo restante.
	13. Reset del volume target indicativo precedentemente definito.
	14. Scorciatoia per lo schermo clinico

Utilizzo della funzione coaching per eseguire una terapia IPPB

Configura una terapia IPPB e avviare la terapia. In base all'impostazione, l'inspirazione può essere avvistata dal paziente o utilizzando il pulsante dedicato.

Il monitoraggio del volume mostra l'evoluzione in tempo reale dello stesso durante l'inspirazione. Questo monitoraggio resta al valore del volume finale fino all'inspirazione successiva. Il contatore di cicli aumenta all'inizio di ogni inspirazione. Alla fine di ogni inspirazione, vengono valutate le perdite

dell'interfaccia del paziente e se l'indicatore perdite  diventa arancione se ci sono troppe perdite all'interfaccia del paziente e dovrebbe essere regolato meglio.

Durante l'inspirazione, il camaleonte si gonfierà seguendo la proporzione del volume iniziale raggiunto. Diventerà progressivamente verde quando si raggiunge e supera il volume iniziale.

Se l'impostazione del volume iniziale è OFF, per le 3 prime inspirazioni:

- Il camaleonte non si gonfia.
- Il volume iniziale rimane indefinito

Dalla prima inspirazione se l'impostazione del volume iniziale è ON o dopo 3 inspirazioni se l'impostazione del volume iniziale è OFF:

- Il volume iniziale è definito. Si tratta del volume medio delle prime 3 inspirazioni. Resta invariato fino al termine della terapia.

Durante l'espiazione, il camaleonte si sgonfia progressivamente fino a tornare di dimensioni normali e del colore iniziale. Resterà così fino alla prossima inspirazione.

La freccia del grafico a barre del volume si sposterà seguendo la proporzione del volume iniziale raggiunto. Rimarrà al livello massimo raggiunto fino alla successiva inspirazione.

