

**EOVE**+




# EO-70

## Função Coaching

### Manual de uso

## O ecrã Coaching em INEX

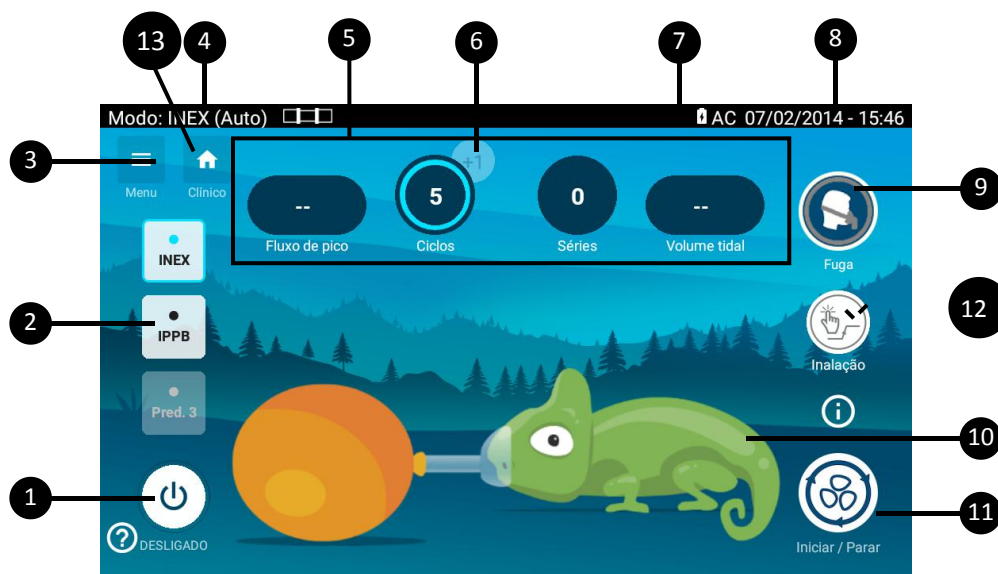


- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Botão para desligar</li> <li>2. Predefinições (1-3): Predefinições disponíveis para o paciente.</li> <li>3. Botão menu: Permite aceder aos diferentes menus</li> <li>4. Indicador de modo de terapia: INEX (manual/Auto) ou IPPB</li> <li>5. Monitorizações de terapia: apresenta os valores monitorizados em tempo real durante a terapia.</li> <li>6. Botão de adicionar ciclo: permite adicionar um ciclo à terapia em curso, se necessário.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Indicador de carga da bateria: indica o nível de carga restante da bateria ou se a bateria está a carregar.</li> <li>8. Data e hora: indique a data em formato AAAA/MM/DD e a hora no formato 24 horas. Pode ser alterado no menu de preferências.</li> <li>9. Indicador de fugas</li> <li>10. Camaleão: animação que acompanha a terapia configurada para auxiliar o paciente.</li> <li>11. Botão iniciar/parar: inicia ou para a terapia.</li> <li>12. Botão Trigger: permite iniciar manualmente uma inspiração durante uma terapia.</li> <li>13. Atalho para o ecrã clínico</li> </ol> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Utilização da função Coaching para realizar uma terapia em modo INEX

Configure uma terapia INEX Auto e inicie a terapia. O camaleão e o balão vão acompanhar as diferentes fases da terapia:

- Durante a inspiração, o camaleão inala e o balão esvazia.

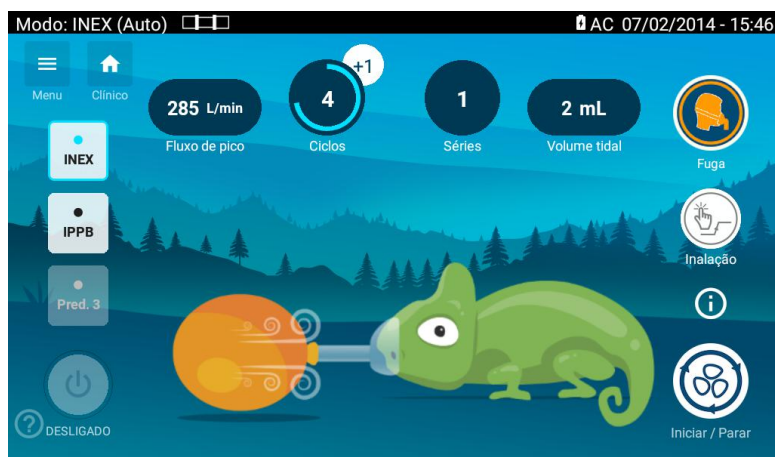

- Durante a expiração, o camaleão expira e o balão enche.

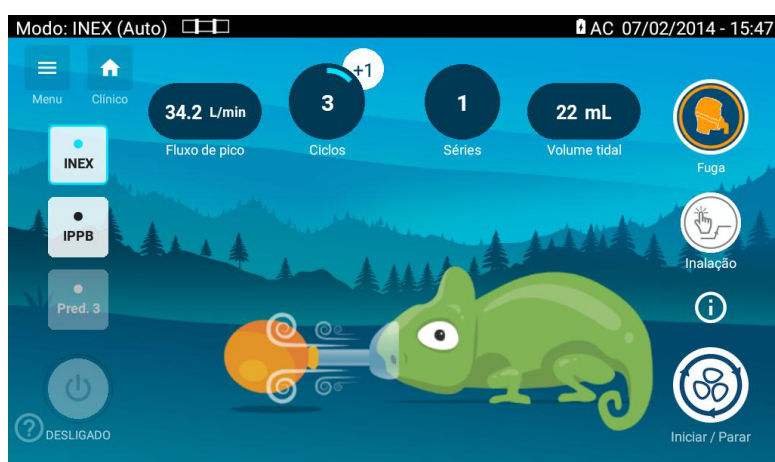


- Durante a pausa, nem o camaleão nem o balão se mexem.

As monitorizações:


- O fluxo do pico é atualizado após cada expiração.
- O contador de ciclos diminui após cada expiração. Pode ser incrementado com o botão "+1" durante o último ciclo.
- O contador de série é incrementado após o início de cada terapia. É repostado a zero quando a predefinição é alterada e quando o aparelho é desligado.
- O volume é atualizado após cada inspiração.
- Indicador de fuga: fica laranja no final da inspiração se houver demasiada fuga na interface do paciente e se esta tiver de ser melhor ajustada. Pode também significar que a pressão inspiratória é demasiado curta para atingir a pressão inspiratória definida. Pode também significar que o tempo inspiratório é demasiado curto para que a pressão pulmonar atinja a pressão inspiratória definida.

No final da terapia (ou à paragem da terapia com o botão "Avançar"), surge uma janela a perguntar ao paciente se vai ser realizada uma nova série ou não.

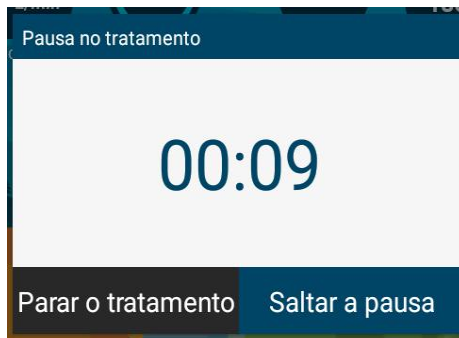

O temporizador é indicativo. Clique em “Avançar a pausa” para reiniciar uma série ou “Fim do tratamento” para parar a terapia.

### O ecrã Coaching em IPPB

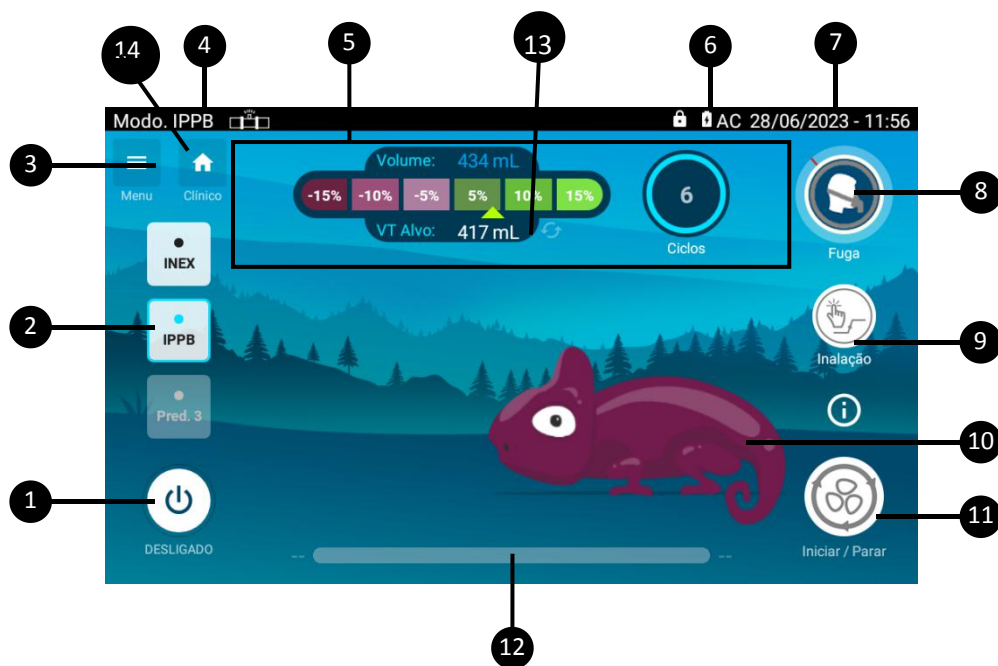

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Botão para desligar</li> <li>2. Predefinições (1-3): Predefinições disponíveis para o paciente.</li> <li>3. Botão menu: Permite aceder aos diferentes menus</li> <li>4. Indicador de modo de terapia: INEX (manual/Auto) ou IPPB</li> <li>5. Monitorizações de terapia: apresenta os valores monitorizados em tempo real durante a terapia.</li> <li>6. Indicador de carga da bateria: indica o nível de carga restante da bateria ou se a bateria está a carregar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Data e hora: Indique a data em formato AAAA/MM/DD e a hora no formato 24 horas. Pode ser alterado no menu de preferências.</li> <li>8. Indicador de fuga</li> <li>9. Botão Trigger: permite iniciar manualmente uma inspiração durante uma terapia.</li> <li>10. Camaleão: animação que acompanha a terapia configurada para auxiliar o paciente</li> <li>11. Botão iniciar/parar: inicia ou para a terapia.</li> <li>12. Barra de tempo de terapia: indica o tempo de terapia passado e o tempo de terapia restante</li> <li>13. Reposição do volume alvo anteriormente definido</li> <li>14. Atalho para o ecrã clínico</li> </ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Utilização da função Coaching para realizar uma terapia IPPB

Configure uma terapia IPPB e inicie a terapia.. Após a configuração, a inspiração tanto pode ser acionada pelo paciente como pelo botão dedicado.

A monitorização do Volume apresenta a evolução em tempo real do volume durante a inspiração. Esta monitorização permanece no valor do volume final até à próxima inspiração. O contador de ciclos é aumentado no início de cada inspiração.

No final de cada inspiração, as fugas na interface do paciente são avaliadas e o indicador de fugas



fica A cor laranja há demasiadas fugas na interface do paciente e que esta deve ser melhor ajustada.

Durante a inspiração, o camaleão insufla-se de acordo com a proporção do volume inicial atingido. Passará progressivamente a verde quando atingir e exceder o volume inicial pretendido.

Se a definição do volume inicial for DESLIGADO, para as 3 primeiras inspirações:

- O camaleão não se mexe
- O volume inicial permanece indefinido

A partir da primeira inspiração, se a definição do volume inicial for LIGADO, ou após 3 inspirações se a definição do volume inicial for DESLIGADO:

- O volume inicial é definido. É o volume médio das 3 primeiras inspirações. Permanece inalterado até ao final da terapia.

Durante a expiração, o camaleão vai soprar progressivamente até voltar ao tamanho e à cor iniciais. Permanecerá assim até à próxima inspiração A seta do gráfico de barras de volume move-se de acordo com a proporção do volume inicial atingido. Manter-se-á no nível máximo atingido até à inspiração seguinte.

